

Bonjour,

Voici les deux modèles de masque barrière homologués AFNOR retenus par la Métropole de Lyon. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons choisir les kits qui seront envoyés à nos couturières et couturiers bénévoles.

Merci de votre compréhension.

NOTICE EXPLICATIVE


Bonjour,

Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre aide dans la confection des masques barrière.

Vous trouverez au sein de ce kit :

- Les coupons A (coupon extérieur – coupon le plus fin)
- Les coupons B (coupon intérieur – coupon le plus épais) entourés de l'élastique rouge
- L'élastique noir (à découper en bandes de 20 cm)
- Cette notice explicative

Confection des masques :

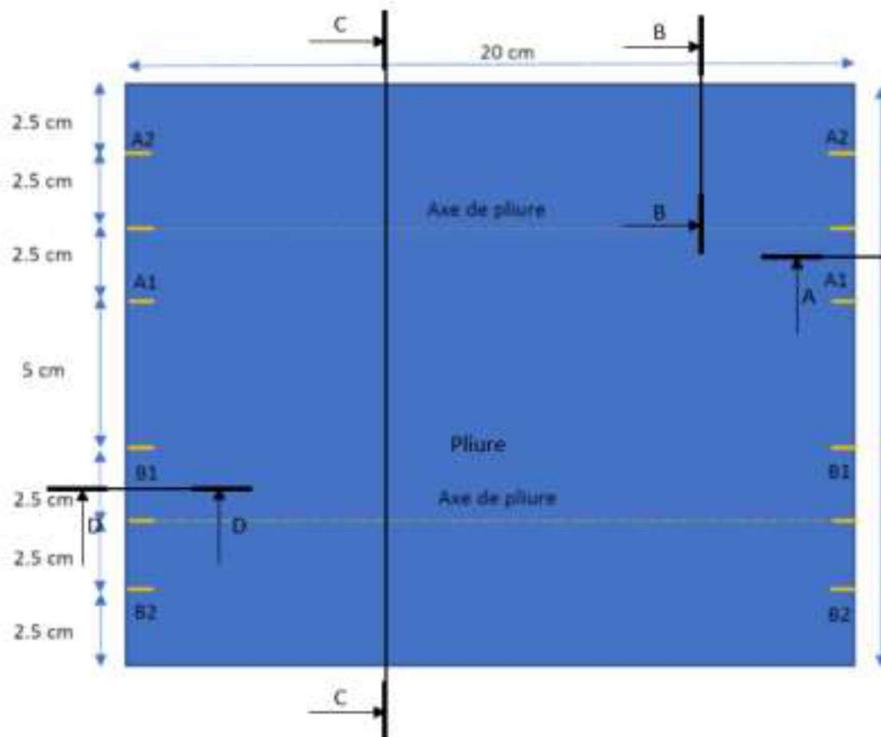

- 1) Prenez 2 coupons A et 1 coupon B
- 2) Positionnez en sandwich ces 3 coupons, le coupon A à l'extérieur et le coupon B à l'intérieur.
- 3) A l'aide d'une règle, placer les repères sur le média prédécoupé comme indiqué ci-dessus (facultatif)
- 4) Glacer (Réaliser une pré-couture) le tour de l'ensemble à 1 cm des bords
- 5) Faire un ourlet de 1 cm à l'intérieur du masque
- 6) Piquer les plis en pliant A1 sur A2 puis B1 sur B2 pour le premier bord ;
Piquer les plis en pliant A1 sur A2 puis B1 sur B2 pour le deuxième bord
- 7) Border les bords du masque en repliant la bande de 5 cm en 2
- 8) Préparer un jeu de brides (deux élastiques souples de 20 cm) :
glacer un élastique sur le bord droit en haut et en bas (élastique vers l'intérieur)

glacer l'autre élastique sur le bord gauche en haut et en bas (élastique vers l'intérieur).

9) Couper à ras des assemblages

Accès à la vidéo explicative de confection en ligne :


www.filtrationsa.com/video



Modele de masque homologué AFNOR

Présentation du produit

Masque alternatif anti-projections. Protège des projections lors d'une toux, d'un éternuement, des postillons.

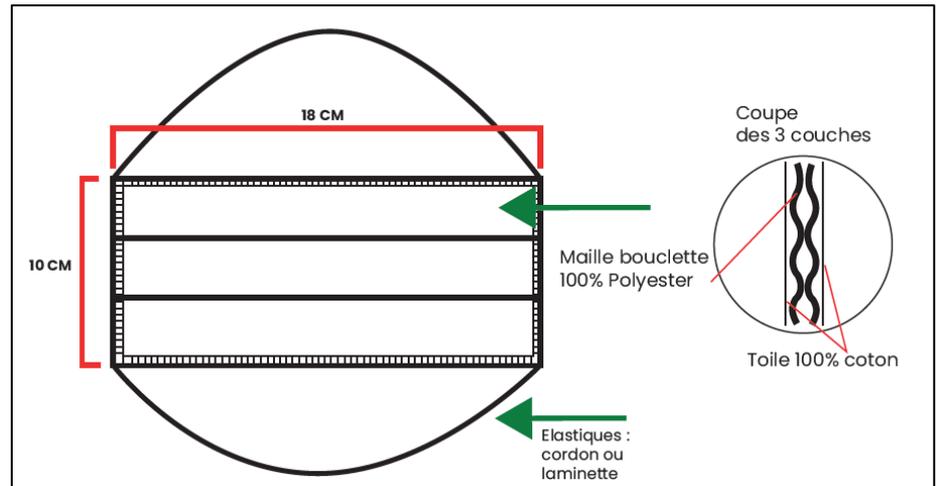

Fabrication du masque – Nomenclature

N°	Nombre	Désignation	Matière - Composition	Observations
1	2	Tissu extérieur	100% Coton lavé décrué	
2	1	Maille bouclette intérieure	100% Polyester	
3	2	Elastique	20% Polyamide / 20% Elasthane / 60% Polypropylène	Longueur 21 cm
4	-	Fil	100% Polyester ou 100 % Coton	

Etapes de fabrication


Matières à disposition :




Elastique 21cm -
Matière N°3
X2

Montage


- 1- Placer les matières 1 et 2 les unes sur les autres de manière à ce que l'on ait le complexe suivant : tissu (Matière 1) / Maille bouclette (Matière 2) - bouclette coté bouche / tissu (Matière 1)

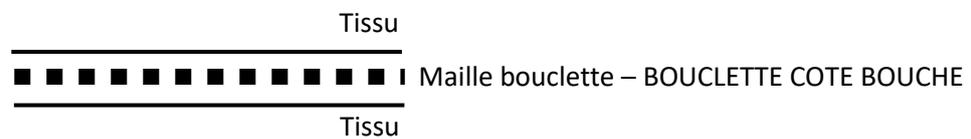

- 2- Fixer à la piqueuse plate le bord des côtés pour faciliter la préparation des plis (étape de glaçage : le complexe est figé).

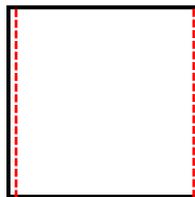

- 3- Préparer les plis à la piqueuse plate selon le schéma suivant :

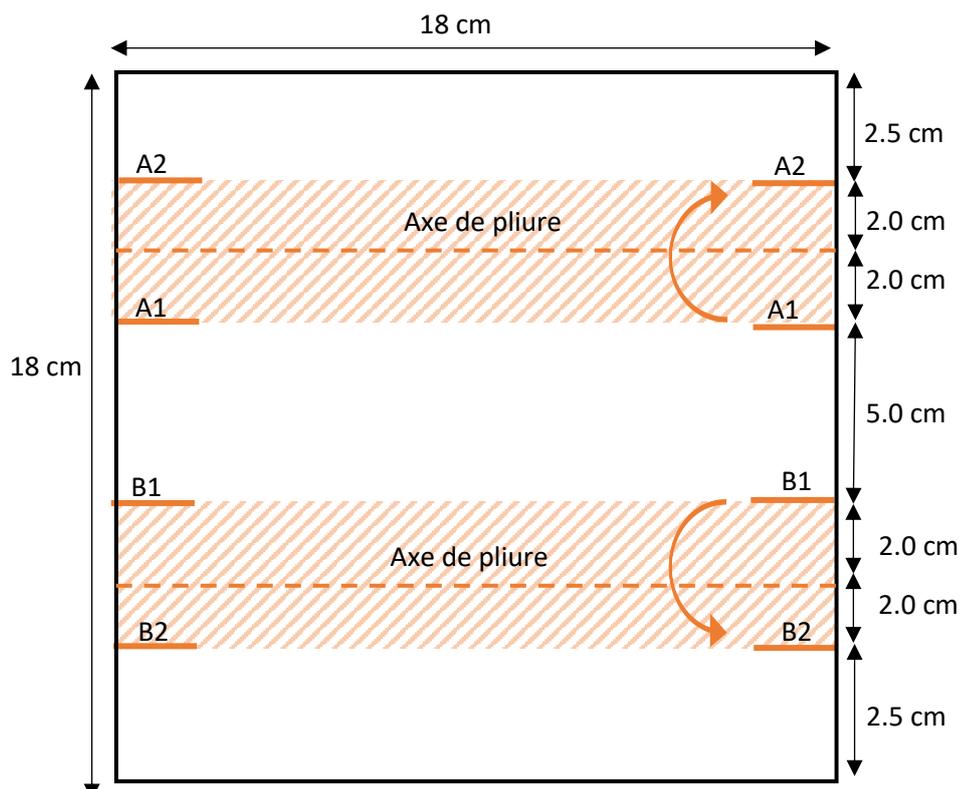

Pour les plis : rabattre A1 sur A2 puis B1 sur B2.

4- Surjeter le périmètre de la pièce (point surjet)



5- Fixer les élastiques sur l'envers du masque :

- a. Poser l'élastique aux extrémités et réaliser les points d'arrêts
- b. Rabattre l'élastique vers l'intérieur du masque
- c. Réaliser une surpiqué sur l'élastique


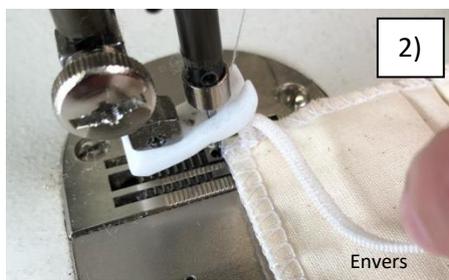


Schéma fixation élastique (vue de coupe)

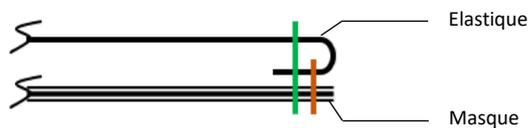

- Point d'arrêt - étape 1
- Surpiqué - étape 3)

6- Couper les fils.